



C/ Santa Anna nº 5
03801 Alcoy (Alicante) Spain
tel. 606963128 y 650782761
<http://www.primlab.com/>

27/07/2020 - V.2

FICHA TÉCNICA MASCARILLA HIGIÉNICA REUTILIZABLE TNT - 4 CAPAS

Descripción:	Mascarilla con 4 capas de tejido TNT.
Composición:	Parte exterior: 2 capas, 100% Polipropileno hidrófobo, 80g/m2. Parte intermedia: 2 capas, 80% Poliéster / 20% Viscosa, 88g/m2.
Gramaje:	Parte exterior: 2 capas, 80g/m2. Parte intermedia: 2 capas, 88g/m2.

DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS TEJIDO

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIÓN	MÉTODO
Composición	73% Polipropileno 21% Poliéster 6% Viscosa	ISO 1833
Peso Total g/m2:	168 g/m2	EN 12127
Construcción tejido	TNT - Tejido No Tejido	BS 5441
Composición gomas elásticas	83% Poliéster - 17% Elastano	ISO 1833
Eficiencia de filtración bacteriana (BFE) (%) (Original >90)	90,01	EN 14683:2019+AC:2019
Respirabilidad: Presión diferencial (Pa/cm2) (Original <60)	23,6	EN 14683:2019+AC:2019
Eficiencia de filtración bacteriana (BFE) (%) (después de 5 lavados >90)	97,52	EN 14683:2019+AC:2019
Respirabilidad: Presión diferencial (Pa/cm2) (después de 5 lavados <60)	17	EN 14683:2019+AC:2019
Nº de informe (Aitex):	2020TM2192	
Actividad antivirica	10-12 % CO2pure	EN 14497:2013 +A2:2019

Especificación UNE 0065:2020. Mascarillas higiénicas reutilizables para adultos y niños. Requisitos de materiales, diseño, confección, marcado y uso.


DESCRIPCIÓN CONFECCIÓN

Talla	9,5X18 cm - Adultos 8,5X17 cm - Grande 6,5X15 cm - Mediana 5,5X13 cm - Pequeña	Color	Blanca	Cantidad:	300 uds x caja	Ajustable con gomas elásticas
-------	---	-------	--------	-----------	----------------	-------------------------------

Fecha de caducidad: 5 años a partir de la fecha de fabricación

"ADVERTENCIA: Este dispositivo no es un producto sanitario en el sentido de la Directiva 93/42 o del Reglamento UE / 2017 / 745, ni un equipo de protección individual en el sentido del Reglamento UE / 2016 / 425".

Instrucciones de colocación:

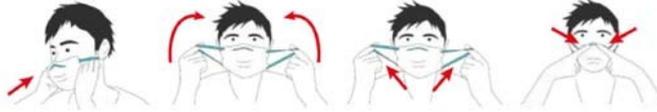

Instrucciones de uso:

- Lavarse las manos con agua y jabón.
- Identificar la parte superior de la mascarilla con el twist band.
- Posicionar la mascarilla en la cara, sostener la mascarilla desde el exterior.
- Bajar la parte inferior de la mascarilla a la barbilla y ajustar la twist band a la nariz.
- Para retirar la mascarilla lavarse las manos con agua y jabón, retirar la mascarilla sin tocar la parte frontal.

Condiciones de lavado:

- Sumergir las mascarillas en una dilución de lejía 1:50 con agua tibia durante 30 min. Después lavar con agua y jabón y aclarar bien para eliminar cualquier resto de lejía y dejar secar.

